

Prysm iO

Inteligentne urządzenie pomagające zadbać o dobrą kondycję

Bądźmy szczerzy — jeśli chodzi o dobrą kondycję, znajomość faktów jest lepsza od domysłów. Śledzisz swoje kroki. Monitorujesz swój sen. Dlaczego więc pozostawiać kwestię odżywiania w niepewności?

Ludzie na całym świecie coraz bardziej dbają o swoją kondycję. Szukają jej powiązań ze swoimi codziennymi zwyczajami, a my wierzymy, że dane mogą rzucić światło na to, co jest naprawdę ważne. Dzisiaj dobre samopoczucie oznacza bycie świadomym, silnym i w zgodzie ze swoim ciałem.

Poznaj Prysm iO — piękny i prosty sposób na wprowadzenie przejrzystości do Twojej rutyny dbania o dobrą kondycję, pokazujący, czy karotenoidy z Twojej diety i suplementów wchłaniają się, i przekształcający Twoje wysiłki w wiedzę..

Ponieważ zrozumienie nawyków to pierwszy krok do podejmowania świadomych wyborów.



POZNAJ PRYSM iO

Prysm iO to inteligentne urządzenie wspomagające dobre samopoczucie, które pozwoli Ci lepiej zrozumieć **skalę poziomu karotenoidów w Twojej skórze (wynik Prysm)** — bez wychodzenia z domu. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik optycznych Prysm iO mierzy poziom karotenoidów w skórze w zaledwie 15 sekund, oferując prosty i nieinwazyjny sposób sprawdzenia, jak przyjmowane suplementy i wybory dietetyczne przekładają się na rzeczywiste rezultaty.

Urządzenie Prysm iO pozwala wyraźnie zobaczyć wpływ podejmowanych wyborów żywieniowych na wynik Prysm, który można dodatkowo wzmocnić stosując certyfikowane produkty Prysm.

Koniec ze zgadywaniem. Wystarczy inteligentne skanowanie, prosty wynik i zupełnie nowy sposób na dostrojenie się do swojego ciała. Dzięki Prysm iO nie tylko śledzisz liczby, ale także przekształcasz wiedzę w działanie, skan po skanie.

DLACZEGO WSZYSCY SĄ ZACHWYCENI

- **Szybko, bezboleśnie i łatwo.** Uzyskaj wynik Prysm w ciągu zaledwie 15 sekund — w dowolnym czasie i miejscu, za pomocą prostego skanu palca.
- **Sprawdź, co naprawdę wchłania Twoje ciało.** Dowiedz się, czy karotenoidy pochodzące z Twojej diety i suplementów są przez Twój organizm dobrze wchłaniane.
- **Inteligentna technologia połączona ze sprawdzonymi kompetencjami.** Pomiar absorpcji światła przez skórę przy użyciu zaawansowanej sztucznej inteligencji oraz dziesięciolecia doświadczenia firmy Nu Skin w pomiarach karotenoidów umożliwiają uzyskanie wyniku Prysm.
- **Poznaj etap swojej podróży.** Użyj towarzyszącej aplikacji (Nu Skin Prysm iO), aby śledzić swój wynik Prysm i zobaczyć, jak zmienia się on wraz ze zmianami w diecie, suplementach i stylu życia.

Prysm iO

NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY

- Prysm iO wykorzystuje technologię Spectral Rai. Jest to szczególny rodzaj technologii świetlnej, która obejmuje ponad 700 000 pojedynczych pomiarów absorpcji hiperspektralnej na skan, co pozwala na dokładną ocenę absorpcji światła w Twojej skórze. Pomiary te są konwertowane na wynik Prysm za pomocą opracowanego algorytmu opartego na sztucznej inteligencji i wykorzystującego technologię Ramana.
- Wykorzystuje również szereg diod elektroluminescencyjnych (LED) do pomiaru poziomu karotenoidów w skórze, uwzględniając jednocześnie inne markery biologiczne, które mogą mieć wpływ na Twój wynik Prysm.
- Oparte na ponad 20-letnim doświadczeniu firmy Nu Skin w technologii pomiaru karotenoidów.

SPOSÓB UŻYCIA

Krok 1. Aby włączyć urządzenie, wciśnij przycisk zasilania.

Krok 2. Umieść opuszek palca wskazującego na obszarze skanowania. Skanowanie rozpocznie się automatycznie.

Uwaga: aby uzyskać dokładne wyniki, trzymaj palec w tym samym miejscu przez cały czas skanowania.

Krok 3. Podczas skanowania światła będą krążyć przez 15 sekund. Po zakończeniu testu pojedyncze migające światło pokaże strefę kolorów Twojego wyniku Prysm.

Krok 4. Po 10 sekundach światła zgasną, a urządzenie będzie gotowe do następnego skanowania. Uwaga: jeżeli w ciągu 1 minuty nie zostanie rozpoczęte żadne skanowanie, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji i wskazówek, pobierz aplikację. Poprowadzi Cię przez proces konfiguracji i pokaże, jak sparować urządzenie.

DOBRE PRAKTYKI DOTYCZĄCE DOKŁADNYCH SKANÓW

- Przed skanowaniem należy umieścić urządzenie Prysm iO na płaskiej, równej powierzchni.
- Trzymaj urządzenie z dala od wody i wilgoci.
- Upewnij się, że Twój palec jest czysty i suchy.
- Przyłóż środek opuszka palca do środka powierzchni skanującej tak dokładnie, jak to możliwe. Upewnij się, że palec całkowicie zakrywa powierzchnię skanującą, aby zablokować dostęp światła zewnętrznego podczas skanowania.
- Pozostań nieruchomo przez 15 sekund podczas skanowania.

PASUJĄCE PRODUKTY

Poniższe suplementy są produktami certyfikowanymi przez Prysm i udowodniono, że zwiększają wynik Prysm:

- LifePak+
- JVi
- Beauty Focus Collagen+
- Beauty Focus MultiBeauty

EFEKTY, KTÓRE TO POTWIERDZAJĄ

Firma Nu Skin przeprowadziła wewnętrzne, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kontrolowane placebo, aby porównać dwie nieinwazyjne metody wykrywania karotenoidów w skórze: skaner Pharmanex S3 BioPhotonic Scanner i Prysm iO.¹

¹ Firma Nu Skin przeprowadziła wewnętrzne, randomizowane, podwójnie ślepe badanie kontrolowane placebo. W badaniu wzięło udział łącznie 46 zdrowych dorosłych w wieku 20–65 lat. Uczestnicy badania otrzymywali suplement zawierający witaminy, minerały, karotenoidy i składniki roślinne (n=29) lub placebo (n=17) i mieli przyjmować produkt dwa razy dziennie podczas posiłków przez 12 tygodni. Poziom karotenoidów w skórze mierzono przez cały okres badania przy użyciu skanera S3 BioPhotonic Scanner (dłoń) i prototypu urządzenia Prysm iO (opuszek palca). Po 12 tygodniach u osób z grupy przyjmującej suplementy zaobserwowano znaczący wzrost poziomu karotenoidów, co wykryły oba urządzenia. Major R., Hester, SN, Gibb T., Riggs M., Ferguson S., Fisk N., Knaggs H. (2025).

Prysm iO

W badaniu wzięło udział łącznie 46 zdrowych dorosłych w wieku od 20 do 65 lat. Uczestnikom badania podawano suplementy zawierające witaminy, minerały, karotenoidy i składniki roślinne (n=29) lub placebo (n=17), z zaleceniem przyjmowania produktu dwa razy dziennie podczas posiłków przez 12 tygodni.

Poziom karotenoidów w skórze mierzono przez cały okres badania przy użyciu zarówno skanera S3 BioPhotonic Scanner (dłoń), jak i prototypu urządzenia Prysm iO (opuszek palca). Oba urządzenia wykazywały podobne wzorce w śledzeniu zmian w czasie: średnio u osób przyjmujących suplement zaobserwowano wzrost poziomu karotenoidów w skórze o 43% (S3 BioPhotonic Scanner) i o 46% (Prysm iO) po 12 tygodniach.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jakie są różnice między skanerem BioPhotonic Scanner a Prysm iO?

- Prysm iO jest mniejszy, mieści się w dłoni i dostarcza wyniki w zaledwie 15 sekund.
- To urządzenie połączone z aplikacją, która umożliwia śledzenie wyników Prysm na przestrzeni czasu i otrzymywanie rekomendacji produktów.
- W przeciwieństwie do skanera BioPhotonic Scanner Prysm iO można nabyć i posiadać osobiście.
- Obie technologie są różne: BioPhotonic Scanner wykorzystuje spektroskopię Ramana, natomiast Prysm iO korzysta z technologii Spectral Rai, która łączy rezonansową spektroskopię Ramana i absorpcję hiperspektralną sterowaną kalibracją AI.

Czym jest technologia Spectral Rai?

Technologia Spectral Rai wykorzystywana w urządzeniu Prysm iO, mierzy absorpcję światła przez skórę i stosuje kalibrację opartą na uczeniu maszynowym, odwołując się do technologii Ramana, aby wyznaczyć Twój wynik Prysm.

Co to są karotenoidy?

Karotenoidy obejmują szeroką rodzinę składników chemicznych. Najbardziej znane to alfa-karoten, beta-karoten, luteina, likopen, zeaksantina i astaksantina.

Są to żółte, pomarańczowe i czerwone pigmenty organiczne wytwarzane przez rośliny i algi, a także niektóre bakterie, archeony i grzyby. Karotenoidy nadają charakterystyczny kolor dyniom, marchewkom, pomidorom, flamingom, łososiom, krewetkom itp.

Czy efekty działania obu produktów z certyfikatem Prysm i SCS są wykrywalne w przypadku Prysm iO?

Tak! Produkty posiadające jeden z dwóch certyfikatów mają za zadanie podnieść poziom karotenoidów w skórze, co może się odzwierciedlić w wyższej punktacji Prysm.

Prysm iO nie jest urządzeniem medycznym i nie powinno być stosowane zamiast profesjonalnej porady lekarskiej. Nie jest przeznaczone do diagnozowania, leczenia, łagodzenia, terapii jakichkolwiek chorób lub schorzeń, zapobiegania im, ani do oddziaływania na strukturę i funkcjonowanie jakiegokolwiek części ciała. Przed podjęciem decyzji dotyczącej swojego zdrowia lub dobrej kondycji zawsze należy skonsultować się ze swoim lekarzem. Pełną listę wskazówek bezpieczeństwa i ostrzeżeń można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia Prysm iO.

Niniejszy dokument jest przeznaczony do użytku przez pracowników i niezależnych Brand Affiliates firmy Nu Skin zarejestrowanych w Europie, z wyjątkiem Ukrainy. Nie jest przeznaczony do wiadomości publicznej. Lista wszystkich zarejestrowanych znaków towarowych na rynkach Nu Skin w Europie i RPA jest podana w glosariuszu znaków towarowych na stronie www.nuskin.com.